

## Harmonogram czyszczenia unitu XO

Przed rozpoczęciem pracy	Jaki środek
<ul style="list-style-type: none"> <li>włącz kompresor, a następnie włącz unit</li> <li>jeśli dzień wcześniej była aktywowana nocna procedura dezynfekcji układu wodnego po włączeniu unitu na wyświetlaczu pokaże się komunikat „Waterclean active”, poczekaj 6 minut, aż pojawi się komunikat „flush ok”.</li> <li>wyjmij rękawy z adaptera spluwaczki i umieść je na konsoli</li> <li>zamontuj wyczyszczonej i zdezynfekowanej podkładkę i miskę spluwaczki oraz gumową tackę pacjenta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>XO Water Disinfection</li> </ul>
Przed każdą wizytą pacjenta	
<ul style="list-style-type: none"> <li>zamontuj czyste: kątnice, podkładkę pod instrumenty, osłony dysz ssących, rączki konsoli i lampy, nasadki ssaka i ślinociągu, końcówkę strzykawko-dmuchawki, końcówkę skalera i osłonę lampy polimeryzacyjnej</li> </ul>	
Po każdej wizycie pacjenta	
<ul style="list-style-type: none"> <li>przepłucz ssaki wodą podłączając je do adapterów do dezynfekcji (bez przyciskania przycisku aktywującego dezynfekcję układu ssącego, po przepłukaniu naciśnij przycisk raz i odłącz ssaki)</li> <li>zdejmij i przeładuj do czyszczenia i sterylizacji: kątnice, nasadki ssaka i ślinociągu, podkładkę pod instrumenty, końcówkę strzykawko-dmuchawki, końcówkę skalera i osłonę lampy polimeryzacyjnej</li> <li>zdezynfekuj wszystkie rękawy i instrumenty, podkładkę konsoli, rączki i konsolę, tackę na narzędzia pod konsolą</li> <li>zdezynfekuj miskę spluwaczki i podkładkę</li> <li>zdezynfekuj fotel pacjenta</li> <li>upewnij się że pod podkładkami na konsoli nie pozostała wilgoć</li> </ul> <p>W razie intensywnego używania systemu ssącego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zdezynfekuj system ssący podłączając ssak i ślinociąg do adapterów w kieszeni serwisowej i dwa razy naciskając przycisk</li> </ul>	<p>tapicerka unitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dezynfekcja: XO Gentle Disinfection / Durr FD-366</li> <li>czyszczenie: XO Fabric Makeup / Durr FD-360</li> </ul> <p>pozostałe części unitu odporne na działanie alkoholu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dezynfekcja: XO Intensive Disinfection / Durr FD-333</li> </ul>
Na koniec dnia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>zdejmij i przeładuj do sterylizacji: nasadki ssaka i ślinociągu, podkładkę konsoli, podkładkę i końcówki instrumentów, podkładkę i miskę spluwaczki</li> <li>wyczyść i zdezynfekuj: konsolę, rękawy, sitka ssaków, instrumenty, pejcze, osłonę lampy operacyjnej i wyświetlacz</li> <li>zamontuj: czyste filtry ssące, umieść rękawy i strzykawko dmuchawkę bez obudowy w uchwycie do dezynfekcji układu wodnego</li> <li>aktywuj nocną procedurę dezynfekcji i poczekaj aż unit wyświetli napis „OK”</li> <li>wyłącz unit</li> </ul>	
2 razy w tygodniu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>wyczyść i zdezynfekuj system ssący – wymieszaj w Orocup 100 ml MD-555 z 2 litrami wody i do podłącz niego ssak i ślinociąg i użyj połowę przygotowanego roztworu (ok. 1 litr)</li> <li>wyczyść i zdezynfekuj spluwaczkę i opcjonalny zawór spluwaczkowy – zdejmij przykrywkę i sitko spluwaczki i wlej pozostały około 1 litr roztworu do spluwaczki i poczekaj 30-120 minut a następnie przepłucz wodą</li> </ul>	przy pomocy Durr MD-555
1 w tygodniu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>wyczyść: tapicerkę za pomocą wody, nóżki sterownika, kółka fotelików</li> </ul>	nóżki sterownika: za pomocą benzyny ekstrakcyjnej
1 raz w miesiącu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>wyczyść sitko zaworu spluwaczkowego dostępne w kieszeni serwisowej (jeśli unit jest wyposażony): przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy a następnie wykręć sitko</li> </ul>	